

GLOW FLOW

By **Alma**™ Lasers

7 ЧУДЕС СВЕТА

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ СВЕТОВОЙ ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗРАИЛЬСКОГО БРЕНДА ALMA LASERS



GLOW FLOW

By Alma™ Lasers

ВПЕРВЫЕ! ВСЯ МОЩНОСТЬ ПОЛНОГО СВЕТОВОГО СПЕКТРА

СИНЕРГИЯ ЛУЧШИХ СВЕТОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ С МАКСИМАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ

- Три манипулы
- 7 мульти-эффектов
- Мощность всего спектра света
- Высокая маржинальность
- Безграничные возможности

НЕТ АНАЛОГОВ НА РЫНКЕ



GLOW FLOW

By Alma Lasers

ЭКСКЛЮЗИВ! ВПЕРВЫЕ В МИРЕ!

В GLOW FLOW СОЧЕТАЮТСЯ ТРИ МАНИПУЛЫ
С ЗАПАТЕНТОВАННОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ УЗКОПОЛОСНОГО СВЕТА!

- ТОЛЬКО НА световых манипулах Alma Lasers Harmony XI\Harmony XI Pro
- ПРИМЕНЯЕТСЯ селективный\избирательный узкополосный свет (с шагом всего 100 нм) для высокоточного устранения несовершенств кожи

7 ЧУДЕС СВЕТА: ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРОТОКОЛ, КОТОРЫЙ ИСПОЛЬЗУЕТ
ВСЮ МОЩНОСТЬ СВЕТОВОГО СПЕКТРА!

В ДРУГИХ АППАРАТАХ:

Устаревшие технологии используют фильтры, отсекающие/блокирующие световой поток «ненужного» (вредного) диапазона, снижая мощность и, соответственно, эффективность процедуры

НА ПЛАТФОРМЕ HARMONY XL:

Новое поколение светового протокола GLOW FLOW с запатентованной технологией (эксклюзивно от Alma Lasers): особая оптика, преломляет ненужный спектр света в нужный полезный спектр. Как результат – максимально эффективная процедура. GLOW FLOW с запатентованной технологией, не теряя ни одного фотона переводит световой поток, с сохранением мощности, в нужный узкополосный поток

Если устаревшие технологии отсекали только ультрафиолетовый спектр, то инновационная технология от Alma Lasers убирает, не только ультрафиолет, но и вредный инфракрасный поток тоже.

GLOW FLOW

By Alma Lasers

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТИ ПРОТОКОЛА?

В протоколе сочетаются 3 манипулы поэтапно:

Dye VI
Dye SR
NIR

ВАЖНО! Каждая манипула селективно решает свой спектр задач. Благодаря запатентованной технологии узкополосного света, по эффективности каждая из манипул приближена к лазерному излучению, а себестоимость процедуры в разы ниже.

ТРОЙНОЙ ЭФФЕКТ

Синергия трех селективных технологий в одном протоколе усиливает действие каждого, демонстрируя результаты более высокой эффективности в сравнении с устаревшими IPL технологиями.

В РАМКАХ СОЧЕТАННОГО ПРОТОКОЛА МЫ ДОСТИГАЕМ:

- Устранения признаков сосудистого типа старения
- Устранения признаков фотостарения
- Устранения признаков дряблости, потери контуров
- Активации неоколлагенеза и мощного лифтинг-эффекта

ПРЕИМУЩЕСТВА ЗАПАТЕНТОВАННОЙ СВЕТОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ:

- Минимизирует риск неблагоприятных последствий
- Более эффективное использование энергии в импульсе
- Повышенная безопасность
- Увеличенный срок службы аппликатора
- Улучшенные клинические результаты
- Надежные, долгосрочные результаты



GLOW FLOW

By Alma™ Lasers

GLOW FLOW

7 ЧУДЕС СВЁТА

Одна процедура. Три световые технологии.
7 эффектов как 7 цветов в спектре света!

1. омолаживает
2. устраняет пигментацию
3. удаляет сосудистые патологии
4. осветляет
5. подтягивает
6. улучшает овал лица
7. сужает поры

КАКИЕ ПОКАЗАНИЯ У ПРОЦЕДУРЫ?

- Неровный тон
- Расширенные поры
- Поверхностная пигментация
- Мелкие телеангиоэктазии (патологические сосуды)
- Дряблость кожи, снижение тургора
- Тусклый цвет лица
- Изменение контуров овала лица

КУРС ПРИМЕНЕНИЯ:

Курсовой протокол

Рекомендовано: 4-6 сеансов с интервалом 2-3 недели.

Повторять курс для закрепления результата можно 2 раза в год.

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТИ ПРОТОКОЛА?



- Высокая маржинальность: рекомендованная стоимость процедуры 15 000₽



- Всесезонная процедура



- В одной процедуре используются 3 популярные самостоятельные манипулы, которые можно использовать и в моно-протоколах



- Полное отсутствие реабилитации для пациента



- Комфортная процедура



- Мультиэффект: протокол закрывает несколько популярных задач эстетической медицины



- Привлечение первичного трафика в клинику: пациент видит WOW-эффект от первого сеанса и проходит курсовую процедуру.




- Увеличенный поток пациентов: длительность процедуры - 15 минут



- Комфорт работы врача: быстрое переключение манипул



- Полная персонализация: каждая манипула позволяет задать индивидуальные параметры под каждого пациента и воздействовать избирательно

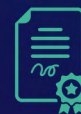

- Запатентованная методика узкополосного светового излучения, не имеющая аналогов

GLOW FLOW

By Alma Lasers

ТРИ МАНИПУЛЫ В ОДНОМ СВЕТОВОМ ПРОТОКОЛЕ!

Идеально как моно-процедуры
Совершенно в комбинированном протоколе

МАНИПУЛЫ, СОЗДАЮЩИЕ
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОТОКОЛ GLOW FLOW



GLOW FLOW

By Alma Lasers

DYE-VL

Первая реальная альтернатива лазерам на красителях: не менее эффективный результат при безболезненном, безопасном и универсальном подходе.

Узкополосное световое излучение в усеченном диапазоне волн 500-600 нм.

Работа в терапевтическом режиме: лечение розацеа, купероза, застойных поствоспалительных пятен от акне, а также фотоомоложение.

Работа в оперативном режиме: удаление сосудистой патологии кожи телеангиоэтазий, ангиом, мелкой сосудистой сеточки.

ПОКАЗАНИЯ:

Удаление сосудистых образований фотоомоложение

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: AFT
- Длина волны: 500-600nm
- Размер пятна: 3 см²
- Частота следования импульсов:
VL (стационарный): 0.5Hz.
SVL (в движении): 3Hz
- Длительность импульса VL: 10, 12, 15 мс.
SVL: 6 мсек (1, 3, 30 сек циклов)
- Флюенс: 1-15 Дж/см² (интервалы 0,2 Дж)
- Охлаждение наконечника
- Ресурс: 1000000 импульсов



GLOW FLOW

By Alma Lasers

DYE SR

Основан на запатентованной технологии узкополосного спектра для точного воздействия на пигментные поражения.

Полосовой фильтр ограничивает диапазон длин волн в пределах 550–650 нм.

Процедуры Dye-SR могут проводиться стационарным методом или используя технологию In-motion (в движении) для постепенного накопления тепла и повышенного комфорта для пациента.

Технология In-motion (в движении), особенно показана для процедур на темном типе кожи.

ПОКАЗАНИЯ:

Работа в терапевтическом режиме: лечение дисхромий кожи, фотоомоложение.

Работа в оперативном режиме: удаление пигментной патологии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: AFT
- Длина волны: 550–650 нм
- Размер пятна: 3 см²
- Частота следования импульсов:
SL: 0,5 Гц. SSL: 3 Гц
- Длительность импульса VL: 10, 12, 15 мс.
SVL: 6 мсек (1, 3, 30 сек циклов)
- Охлаждение наконечника
- Ресурс: 1000000 импульсов



GLOW FLOW

By Alma Lasers

NIR

ГЛАВНЫЙ КОЗЫРЬ ПРОТОКОЛА

«БЕСКОНЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ»
ВАШЕГО БИЗНЕСА –
ВЕЧНАЯ МАНИПУЛА БЕЗ РЕСУРСА

ВПЕРВЫЕ НА РЫНКЕ –
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ СВЕТОВАЯ МАНИПУЛА,
КОТОРАЯ БУДЕТ РАБОТАТЬ СКОЛЬКО ПОТРЕБУЕТСЯ



GLOW FLOW

By Alma Lasers

NIR

Работает на эксклюзивной длине волны 1300 нм (только полезные лучи из инфракрасного спектра). Аналогов нет.

В отличие от устаревших IPL методов, манипула NIR имеет более глубокое проникновение, работает безопасно и избирательно. Работает с водой и белковыми структурами кожи. Как результат – несколько эффектов: увеличение плотности дермы, устранение тонких линий, уменьшение глубины мимических морщин и дермальный лифтинг.

Используется высокомоощный источник света в ближнем инфракрасном диапазоне для безопасного и эффективного прогрева глубоких слоев дермы, стимулируя выработку коллагена, укрепляя каркас, разглаживая рельеф и улучшая состояние кожи.

ПОКАЗАНИЯ:

Лифтинг кожи лица, улучшение контуров овала лица

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: ИК-лампа
- Длина волны: 1300 Нм
- Рабочий размер пятна: для зоны лицо – 6,4 см²
- Частота следования импульсов: фиксированная 10 Гц
- Контактное охлаждение (в корпусе HP)
- БЕЗ РЕСУРСА



GLOW FLOW

By Alma Lasers

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ АППАРАТНОЙ КОСМЕТОЛОГИИ!

Световой протокол, который использует всю мощь светового спектра!

7 ЧУДЕС СВЕТА ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА



До



После



До



После



До



После



До



После



МАРКЕТИНГ ПОЛНОГО ЦИКЛА

Готовое решение для быстрого старта процедуры в вашем бизнесе



СКРИПТЫ ДЛЯ АДМИНИСТРАТОРОВ

Готовые скрипты на процедуру с популярными вопросами пациентов для легкого внедрения нового протокола



КОНТЕНТ ДЛЯ СОЦСЕТЕЙ

Готовые посты для ваших соцсетей: тексты, макеты, анимация

Все макеты в удобных форматах (.jpg, .psd) для редактирования под ваш фирменный стиль



ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Буклеты для пациентов



ВИЗУАЛ ДЛЯ DIGITAL

Готовые банеры в разборном виде

GLOW FLOW

By Alma Lasers

129110, Москва, пр. Мира, 56с1
Тел.: +7 (800) 350 10 69
info@alma-laser.ru

 alma-laser.ru
nbcdevelopment.ru

